


BAPSCARCARE®

Professionele Littekenbehandeling

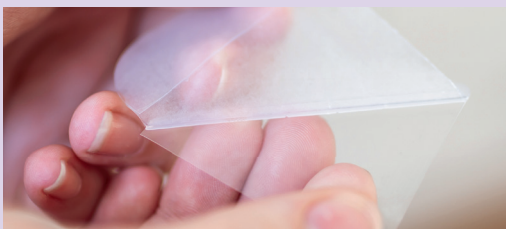

Meest gestelde vragen

Wat is een litteken?

Een litteken is een natuurlijke reactie van het lichaam op een diepe beschadiging van de huid, bijvoorbeeld na een operatie, brandwond of ongeluk.

Wanneer gebruik ik BAPSCARCARE?

- Als een litteken na wondsluiting langdurig rood blijft
- Als een vers litteken verdikt is, groeit of klachten geeft
- Als een ouder litteken klachten geeft
- Preventief bij dichte wonden, wanneer je weet dat je gevoelig bent voor afwijkende littekens

Welk BAPSCARCARE-product moet ik gebruiken?

Dat hangt af van je wond/litteken en je persoonlijke situatie. Overleg met je (huis)arts welk BAPSCARCARE-product voor jou het meest geschikt is.

Hoe snel werkt het?

Binnen enkele dagen merk je al verschil! Een behandeling duurt gemiddeld 2 tot 6 maanden, maar soms is langere therapie nodig.

Hoe kan ik BAPSCARCARE verkrijgen?

BAPSCARCARE is een medisch hulpmiddel en vrij verkrijgbaar bij de apotheek.

WWW.BAPSCARCARE.BE

Assortiment

Siliconen littekengel

BAPSCARCARE GEL

Gel
20 g / 1 tube
CNK 2755-817



Gel + SPF
10 g / 1 tube
CNK 4520-995



Zeer dun siliconen littekenverband

BAPSCARCARE T

5 x 7 cm
10 stuks
CNK 2755-783



10 x 15 cm
10 stuks
CNK 2755-809



5 x 30 cm
10 stuks
CNK 2755-791



Wasbaar siliconen littekenverband

BAPSCARCARE S


Mamma
4 x 30 cm
4 stuks,
2 paar
CNK 2922-839

**Mamma-
anker**
4 x 30 cm
4 stuks, 2 paar
CNK 2922-888

Abdomen
4 x 40 cm
2 stuks,
1 paar
CNK 2922-813

Sleutelgat
10 x 18 cm
4 stuks,
2 paar
CNK 2922-854

Tepel
Ø 10 cm
4 stuks,
2 paar
CNK 2922-797

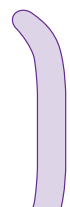


5 x 20 cm
2 stuks
CNK 2922-805




10 x 15 cm
2 stuks
CNK 2922-821




15 x 20 cm
2 stuks
CNK 2922-847

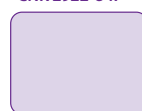

40 x 100 cm
1 stuk
CNK 2922-870

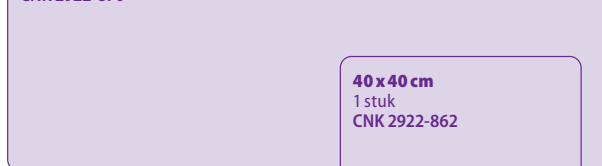

40 x 40 cm
1 stuk
CNK 2922-862

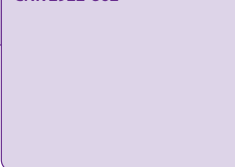

WWW.BAPSCARCARE.BE



BAPMEDICAL
MEDICAL CARE FOR THE SKIN

BAP Medical B.V.
Laan van Westenek 64
7336 AZ Apeldoorn

Tel. +31 (0)55 355 25 80
Fax +31 (0)55 355 91 98

www.bap-medical.nl
info@bap-medical.com

BAPSCARCARE®

Professionele Littekenbehandeling

Omdat
elk litteken
zorg nodig
heeft

- ✓ Voorkomt en vermindert afwijkende littekens
- ✓ Vermindert klachten (zoals jeuk, roodheid)
- ✓ Wetenschappelijk onderbouwd
- ✓ Comfortabel in gebruik

SILICONENTHERAPIE

Het meest gebruikt door specialisten!



Professionele siliconentherapie om afwijkende littekens te voorkomen én te behandelen

BAPSCARCARE is een medische siliconen littekentherapie die zorgt voor een sneller en mooier herstel van je huid.

Bij bestaande littekens zorgt BAPSCARCARE ervoor dat je littekens vlakker, soepeler en dunner wordt. Het litteken wordt minder ontsierend, en in veel gevallen zelfs bijna onzichtbaar. Ook wanneer je littekens verdikt is en een dikke 'streng' op je huid heeft gevormd, zorgt BAPSCARCARE voor een zichtbare afname.

Kleine en grote littekens

BAPSCARCARE kun je gebruiken voor zowel kleine als grote littekens na een:

- Medische operatie
- Cosmetische operatie
- Brandwond
- Ongeval
- Keizersnede
- Schaafwond

"Ik heb al veel gels geprobeerd, maar BAPSCARCARE-gel is de allerbeste! Mijn littekens is grotendeels verdwenen, en ik heb minder last van jeuk en roodheid".

- Kim -

Minder last van je litteken

Littekens zijn niet alleen ontsierend, maar zorgen ook voor vervelende klachten. BAPSCARCARE-producten verlichten en verhelpen deze klachten.

- Jeuk, droge huid
- Aanhoudende rode huid
- Minder soepele, pijnlijke huid
- Verdikking op je huid
- Trekkende huid

Wetenschappelijke ondersteuning

De bewezen werking van siliconentherapie is wetenschappelijk aangetoond in vele studies. Siliconentherapie is al decennia lang de meest gebruikte vorm van littekenbehandeling door specialisten. BAPSCARCARE wordt wereldwijd geadviseerd dankzij het gebruiksgemak.

BAPSCARCARE®

Professionele Littekenbehandeling



Welk product je nodig hebt, hangt af van jouw persoonlijke situatie en voorkeur. Er is altijd een siliconen littekentherapie die bij je past!

Littekengel met UV-bescherming

Littekens in je hals en het gezicht zijn gevoelig voor UV-stralen. Een litteken heeft zeker tot 1 jaar na wondsluiting een verhoogde kans op blijvende verkleuring en huidkanker als gevolg van deze UV-stralen. BAPSCARCARE GEL met hoge UV bescherming (SPF 40) zorgt voor een optimale behandeling én bescherming van je litteken, ook wanneer je de zon niet kan ontlopen.



"Met BAPSCARCARE-T hoef ik maar om de 7 dagen een nieuw verband aan te brengen. Daarnaast is het ook nog eens veel dunner. Super!"

- Merel -

"BAPSCARCARE is gebruiksvriendelijk en zeer comfortabel!"
- Conclusie panelonderzoek bij specialisten en willekeurige proefpersonen -

Hoog gebruiksgemak

Naast het effect van BAPSCARCARE, hebben we evenveel aandacht besteed aan het gebruiksgemak. Dat heeft ertoe geleid dat onze producten unieke gebruiksvriendelijke kenmerken hebben. Alle voordelen op een rij:

BAPSCARCARE GEL

Siliconen littekengel

- Voelt prettig en zijdezacht aan
- Onzichtbaar
- Direct droog
- Plakt niet
- Te combineren met make-up
- Ook verkrijgbaar met UV-bescherming



BAPSCARCARE T

Zeer dun siliconen littekenverband

- Wassen niet nodig
- Ultradun en onzichtbaar
- Zelfklevend
- Ideaal voor huidplooiën en gewrichten



BAPSCARCARE S

Wasbaar siliconen littekenverband

- Makkelijk wasbaar / snel droog
- Transparant
- Zelfklevend
- Comfortabel onder drukkleiding
- Verkrijgbaar in voorgevormde modellen (zie assortiment)

