


MOVES® SLC™

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

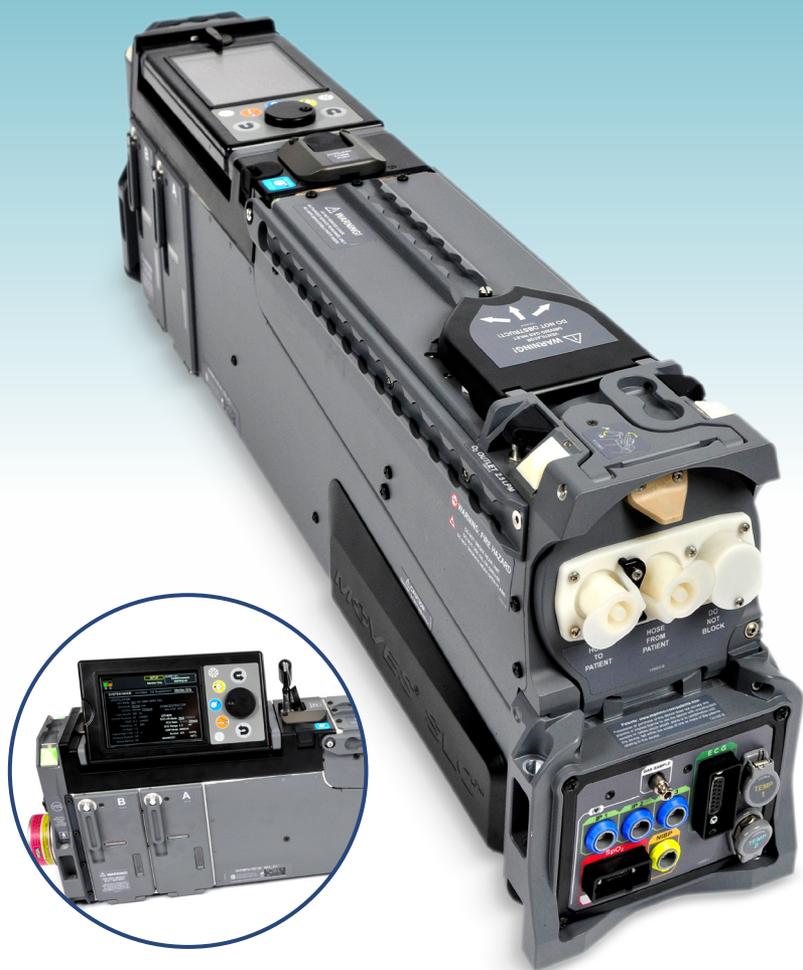

Ce guide de démarrage rapide MOVES® SLC™ est conçu pour répondre aux besoins de formation additionnelle en vue de l'utilisation de MOVES® SLC™ et ne remplace pas le guide de l'utilisateur.

THORNHILL
MEDICAL
Inspiring Innovation

MOVES® SLC™

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR PATIENTS VENTILÉS

ÉTAPE un

Soulevez le loquet de déverrouillage/verrouillage de la porte de la cartouche du ventilateur situé en haut à l'avant du MOVES® SLC™. Insérez la cartouche du ventilateur, fermez la porte et verrouillez-la en appuyant sur le loquet.

REMARQUE : ne pas retirer la fixation en plastique transparent autour de la cartouche du ventilateur.




ÉTAPE deux

Vérifiez l'installation du filtre à hydrocarbures dans le panneau arrière du MOVES® SLC™.



ÉTAPE trois

Fixez le piège à eau au port « from patient » (du patient) sur la porte de la cartouche du ventilateur.
Fixez les tubulures du patient du circuit respiratoire du ventilateur au piège à eau et au port « to patient » (vers le patient) de la porte de la cartouche du ventilateur.
Connectez la tubulure Nafion à la ligne d'échantillonnage.

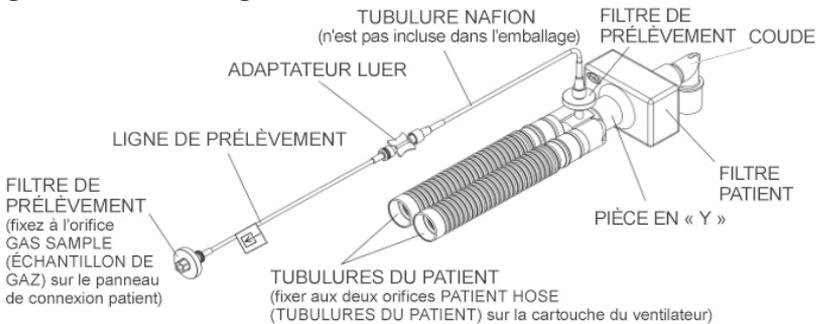

ÉTAPE quatre

Si les patients ventilés pèsent moins de 30 kg ou si des volumes courants inférieurs à 150 ml sont utilisés, remplacez le filtre du patient du circuit respiratoire du ventilateur par un filtre pour patients en pédiatrie.

ÉTAPE cinq

Fixez la cartouche d'aspiration et la tubulure au MOVES® SLC™.




ÉTAPE six

Connectez tous les accessoires de surveillance du patient requis au MOVES® SLC™. **NE RIEN CONNECTER AU PATIENT À CE MOMENT.**

ÉTAPE sept

Vérifiez les niveaux de charge des batteries du MOVES® SLC™ et installez les batteries.

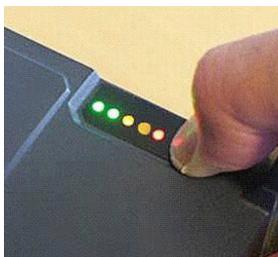

ÉTAPE huit

Connectez le bloc d'alimentation/le chargeur du MOVES® SLC™ au MOVES® SLC™ si les batteries doivent être rechargées et/ou si le MOVES® SLC™ doit être branché à l'alimentation secteur.



REMARQUE : le MOVES® SLC™ nécessite que les deux batteries soient installées, ou qu'une batterie soit installée avec une connexion au bloc d'alimentation/au chargeur et à l'alimentation secteur, lorsqu'il fonctionne.


ÉTAPE neuf

Allumez le MOVES® SLC™ en appuyant sur le bouton d'alimentation sur le panneau arrière.




ÉTAPE dix

En réponse à l'invite, configurez le système MOVES® SLC™ pour un nouveau patient et initialisez les paramètres de l'appareil aux valeurs par défaut en sélectionnant YES (Oui). Sélectionnez NO (Non) pour conserver les valeurs des paramètres utilisées précédemment.

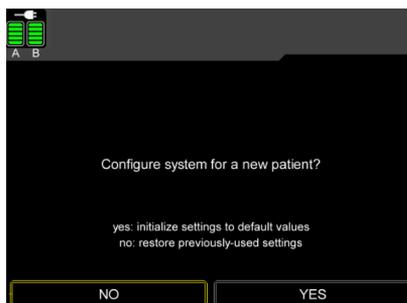

ÉTAPE onze

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les tests de système. Quand tous les tests sont terminés et ont été réussis, sélectionnez CONTINUE (Continuer).

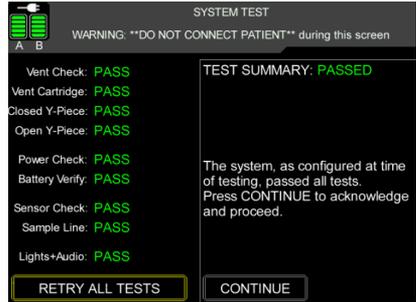

ÉTAPE douze

MOVES® SLC™ passe au menu Setup (Configuration) et s'initialise en mode Monitor Only (Surveillance seulement).



AVERTISSEMENT :

le système ne ventile pas en mode Monitor Only (Surveillance seulement) ou O₂ Supplement (Oxygène d'appoint). Un changement du système pour qu'il fonctionne dans ces modes arrêtera la ventilation.




ÉTAPE treize

Dans le menu Setup (Configuration), effectuez les modifications de paramètres nécessaires avant d'initialiser la ventilation du patient. Connecter également les câbles de surveillance du patient souhaités au patient.

REMARQUE : la ventilation et d'autres paramètres peuvent être modifiés même si le système est en mode Monitor Only (Surveillance seulement).

ÉTAPE quatorze

Fixez le circuit respiratoire du ventilateur au patient. Changez le mode du système pour le mode Ventilate (Ventilation). La ventilation commence en utilisant les paramètres indiqués.

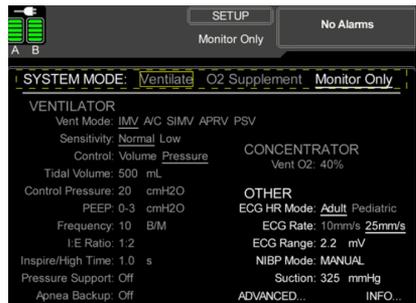

Remplacement de la cartouche du ventilateur pendant le fonctionnement

Si l'alarme du MOVES® SLC™ sonne, avisant l'opérateur de remplacer la cartouche du ventilateur :

- Retirez une nouvelle cartouche de ventilateur de son emballage avant d'apporter toute modification au système
- Allez au menu Setup (Configuration) et changez le mode du système pour passer en mode Monitor Only (Surveillance seulement) pour arrêter la ventilation.
- Déconnectez le piège à eau du port « from patient » (du patient) pour permettre à la porte de la cartouche du ventilateur de s'ouvrir.
- Ouvrez la porte de la cartouche du ventilateur et retirez la cartouche du ventilateur épuisée.
- Insérez la nouvelle cartouche du ventilateur, puis fermez et verrouillez la porte de la cartouche du ventilateur.
- Reconnectez le piège à eau à la porte de la cartouche du ventilateur et assurez-vous que les tubulures du patient du circuit respiratoire du ventilateur restent connectées.
- Changez le mode du système pour revenir au mode Ventilate (Ventilation) pour reprendre immédiatement la ventilation du patient.

Interface du MOVES® SLC™

Quand les tests de système du MOVES® SLC™ sont terminés, les écrans suivants sont disponibles :

- **SETUP (Configuration)** : Afficher et modifier les principaux paramètres de fonctionnement du MOVES® SLC™.
- **MAIN (Principal)** : Afficher l'état du patient et les paramètres du système physiologique qui sont surveillés.
- **ECG (ECG)** : Afficher simultanément les signaux ECG des 12 dérivations.
- **VALEURS LIMITES DE L'ALARME** : Afficher et modifier les valeurs limites physiologiques pour les alarmes du système.
- **ALARM ON/OFF (Alarmes activées/désactivées)** : Afficher l'état de l'alarme du système et allumer ou éteindre les signaux d'alarme individuellement.
- **SYSTEM TEST (Tests de système)** : Examiner l'état des tests de système effectués.

THORNHILL
MEDICAL
Inspiring Innovation